

viba®brush

viba®brush

Ev testi kullanıcı açıklamaları



Rovers Medical Devices B.V.
Lekstraat 10, 5347 KV Oss
Hollanda
Tel: +31 (0)412 648 870
info@roversmedicaldevices.com
www.roversmedicaldevices.com

Rovers® Viba-Brush® patentli bir ürün
ve tescilli bir tasarımdır.

Rovers® and Viba-Brush®,
Oss, Hollanda'da bulunan
Rovers Medical Devices B.V.'nin
tescilli ticarî markasıdır.



REF 380200331
VRM-2021-03-TR



Rovers Viba-Brush rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için evde rahat ve hijyenik bir test yapabilmenize olanak sağlar. Viba-Brush, vajinanızdan kolayca hücre örneği almanıza imkân sunar. Bu hücre örneği daha sonra uzman bir laboratuvarında analiz edilebilir.

Önceden bilmeniz gerekenler:

- Tek kullanımlıktır.
- Tekrar kullanımı, kontaminasyona (bulaşıya) ve yanlış teşhise neden olur.
- Viba-Brush ambalajı hasarlıysa veya son kullanım tarihi geçmiş ise, testi kullanmayınız.
- Âdet dönemi sırasında kullanmayınız.
- Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamileliği takip eden üç ay içerisinde veya hamilelik süresince kullanmayınız.
- Viba-Brush kullanmadan en az 2 gün önce vajinal ürünlerin kullanımı bırakılmalıdır. Gebeliği önleyici vajinal halkalar, prezervatif ve su bazlı kayganlaştırıcıları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ev testi nasıldır?

Rovers Viba-Brush 20 cm uzunluğundadır; vajinadan hücre örneği alınabilmesi için beyaz fırça ve pembe sap kısmından oluşur.

Ev testi içeriği:

1. Viba-Brush
2. ReMover
3. Beyaz emici ped içeren plastik poşet
4. Geri iade zarfı




Esnek kılları olan beyaz fırça




Testi aşağıdaki şekilde uygulayınız:



Başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

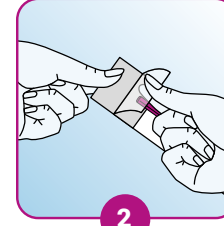


Sapın altından ambalajı açın. Sapı tutarak Viba-Brush'ı ambalajdan çıkarın.

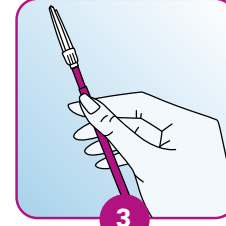


Viba-Brush'ı dikkatlice tutun ve beyaz fırça kısmına dokunmayın.




Rahat bir pozisyona geçin (tampon yerleştirdiğinizde olduğu gibi).

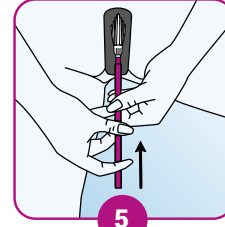


Acı vermeyecek şekilde bir direnç hissedinceye (en az 5 cm derine) kadar Viba-Brush'ı içeri doğru itin.

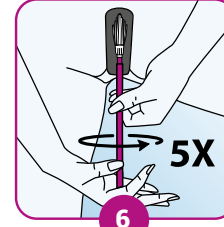


Viba-Brush'ı 5 kez 360 derece döndürün.

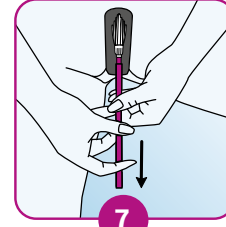


Viba-Brush'ı vajinadan çıkarın.

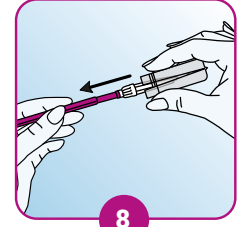


Viba-Brush'ı ReMover'ın içine fırçanın gidebildiği yere kadar itin ve ReMover'ı sıkarak kapalı tutun.

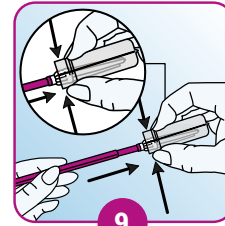

Beyaz fırçayı pembe sap kısmından ayırmak için ReMover'ı kullanın. ReMover'ı sıkıca kapalı tutmaya devam edin. Pembe sap kısmı, artık çıkarılabilir.

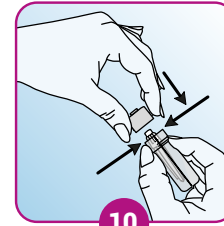

Ambalaj içeriğindeki kapağı ReMover'ın açık ucuna yerleştirin. Kapağın yerine oturup oturmadığını kontrol edin.

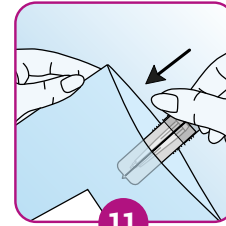

ReMover'ı ambalaj içeriğindeki plastik poşetin içine koyup ağzını kapatın. Geri iade zarfı ile plastik poşeti bize gönderin.